

CE

MANUALE D'USO SINTETICO

Mod. MARS



Distribuito in esclusiva da Alcolino®


CONTENUTO

- 1 Dichiarazione di Conformità*
- 2 Informazioni Preliminari*
- 3 Precauzioni d'uso *
- 4 Descrizione dello strumento
- 5 Modalità d'uso
- 6 Eseguire il Test
- 7 Errori
- 8 Calibrazione
- 9 Specifiche tecniche
- 10 Garanzia*

**I paragrafi indicati, non sono stati inseriti nel manuale sintetico*

Grazie per aver scelto il nostro modello MARS, lo strumento è un nuovissimo etilometro che impiega i più avanzati sensori elettrochimici di classe II, con margine di errore a $\pm 5\%$. Di semplice utilizzo e dal design accattivante, l'etilometro è disponibile nelle due colorazioni nero e celeste, un ottimo strumento per uso personale o professionale

DETTAGLIO ETILOMETRO

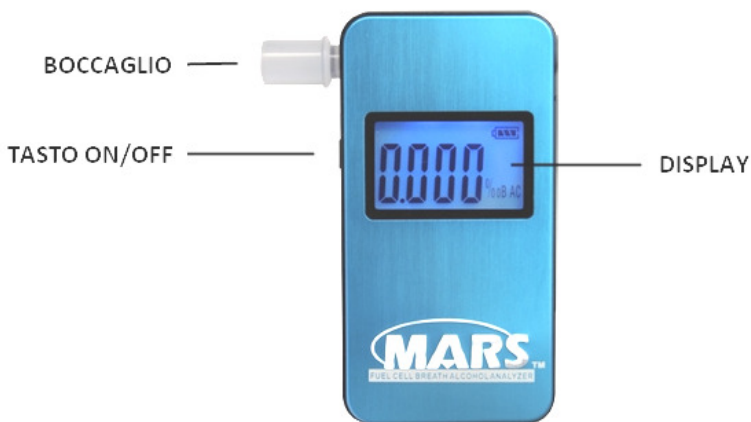

DETTAGLIO DISPLAY



DOTAZIONE CONFEZIONE

- n. 1 Etilometro MARS
- n° 5 boccagli sigillati
- n° 1 custodia morbida in neoprene
- n° 2 Pile mini stilo tipo AAA

FUNZIONAMENTO

1. Inserire due pile ministilo tipo AAA in dotazione.
2. Per accendere il dispositivo tenere premuto il tasto ON/OFF posizionato sul lato sinistro.
3. Appena acceso, il display visualizza per due secondi il numero dei test effettuati.
4. Inserire il boccaglio.
5. Quando sullo schermo appare la scritta "BLOW" assieme al numero "0" che scorre, soffiare continuamente per 5 secondi. La durata del test è indicata da un "bip" prolungato.
Se non si soffia abbastanza a lungo o si interrompe il soffio, il dispositivo resta comunque in funzione per provare ad effettuare nuovamente il test fino al raggiungimento dei 5 secondi necessari.
6. Il risultato del test appare sullo schermo.
7. Per effettuare un nuovo test premere il tasto ON/OFF.
8. Se non viene effettuata alcuna operazione, il dispositivo si spegne automaticamente entro 1 minuto, altrimenti tenere premuto il tasto ON/OFF per circa 2 secondi.

CONTEGGIO DEI TEST EFFETTUATI

1. Ogni qualvolta si accende l'etilometro questo visualizza immediatamente il numero totale dei test effettuati.
2. Per verificare il risultato dell'ultimo test effettuato tenere premuto il tasto ON/OFF per 2 secondi.

MESSAGGI DI ERRORE

È possibile constatare lo stato delle batterie tramite l'apposito indicatore che compare in alto a destra sullo schermo.

CALIBRAZIONE

La calibrazione deve essere effettuata ogni 1.000 test o al massimo dopo 12 mesi, tale procedura viene svolta presso la nostra sede, previo invio dell'etilometro, l'operazione prevede una durata massima di circa 5 giorni lavorativi.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.alcolino.it o chiamate il servizio clienti al numero verde gratuito 800.132.893.

La mancata manutenzione dello strumento porterà a una diminuzione di precisione dello stesso, non garantendo più un margine di errore accettabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Unità di misura	gr/l
Intervallo di misurazione	0.00 / 4.00 gr/l
Precisione	± 5% gr/l
Sensore	Elettrochimico classe II
Alimentazione	Due Pile mini stilo tipo AAA (incluse)
Temperatura di esercizio	0° – 45° C
Autospegnimento	Dopo 4 minuti
Display	3-digit LCD
Dimensioni (mm)	53 x 103 x 17 mm
Peso	110 gr con batterie
Calibrazione	Al raggiungimento di 1.000 Test o massimo ogni 12 mesi

ALCOLINO[®]
ETILOMETRI PROFESSIONALI DIGITALI

Copyright UNIUS di Lazzari Francesco

è vietato qualsiasi tipo di riproduzione, anche parziale, salvo esplicita autorizzazione